

# madita-fun mini.



## Gebrauchsanleitung.

**madita-fun mini.** Der Therapiestuhl für die Erstversorgung.

  
**schuchmann®**

**Vielen Dank.**



**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

an dieser Stelle möchten wir Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den Erwerb unseres Produkts danken. Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Berücksichtigen Sie bitte, dass Hinweise und Darstellungen in dieser Gebrauchsanleitung auf Grund der Ausstattung von Ihrem Produkt abweichen können. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

**Wichtige Information!**

Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanleitung bei dem Produkt verbleibt.

Ihr **schuchmann**-Team



|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Vorbereitung.</b>                                             | <b>05</b> |
| 1.1 Auslieferung.....                                               | 05        |
| 1.2 Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gebrauch .....                     | 05        |
| 1.3 Sicheres Entsorgen .....                                        | 05        |
| 1.3.1 Verpackung .....                                              | 05        |
| 1.3.2 Produkt.....                                                  | 05        |
| 1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung .....                     | 06        |
| <b>2. Produktbeschreibung.</b>                                      | <b>06</b> |
| 2.1 Materialinformationen .....                                     | 06        |
| 2.2 Handhabung / Transport.....                                     | 06        |
| 2.3 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemäße Verwendung.....           | 06        |
| 2.3.1 Indikationen.....                                             | 06        |
| 2.3.2 Kontraindikationen.....                                       | 07        |
| 2.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung / Warnhinweise .....         | 07        |
| 2.5 Ausstattung Grundmodell.....                                    | 07        |
| 2.6 Auflistung Zubehör.....                                         | 08        |
| 2.7 Produktübersicht.....                                           | 08        |
| <b>3. Einstellungen.</b>                                            | <b>09</b> |
| 3.1 Sitzhöhe .....                                                  | 09        |
| 3.2 Sitzwinkel.....                                                 | 09        |
| 3.3 Sitztiefe.....                                                  | 10        |
| 3.4 Rückenneigung.....                                              | 10        |
| 3.5 Rückenhöhe.....                                                 | 10        |
| 3.6 Rücken mit integrierter Oberarmführung .....                    | 10        |
| 3.7 Armlehnen .....                                                 | 11        |
| 3.8 Fußbank .....                                                   | 11        |
| 3.9 Laufrollen .....                                                | 12        |
| <b>4. Zubehör.</b>                                                  | <b>12</b> |
| 4.1 Kopfstütze .....                                                | 12        |
| 4.2 Thoraxpelotten beim Standard-Rücken .....                       | 13        |
| 4.3 Thoraxpelotten beim Rücken mit integrierter Oberarmführung..... | 13        |
| 4.4 Oberschenkelführung .....                                       | 14        |
| 4.5 Dysplasie-Sitz.....                                             | 15        |
| 4.6 Innenbeinführung.....                                           | 15        |
| 4.7 Therapietisch.....                                              | 16        |
| 4.8 Begurtung.....                                                  | 16        |
| <b>5. Reinigen und Instandhalten.</b>                               | <b>17</b> |
| 5.1 Reinigen und Desinfizieren.....                                 | 17        |
| 5.1.1 Reinigung.....                                                | 17        |
| 5.1.2 Desinfektion.....                                             | 18        |
| 5.2 Instandhaltung .....                                            | 18        |
| 5.3 Wartung .....                                                   | 18        |
| 5.3.1 Wartungsvorgaben .....                                        | 18        |
| 5.3.2 Wartungsplan .....                                            | 19        |
| 5.4 Ersatzteile .....                                               | 20        |
| 5.5 Nutzungsdauer und Wiedereinsatz .....                           | 20        |

**6. Technische Daten. .... 21**

**7. Gewährleistung. .... 22**

**8. Identifizierung. .... 23**

    8.1 Seriennummer / Herstellungsdatum ..... 23

    8.2 Produktversion ..... 23

    8.3 Ausgabe des Dokuments..... 23

    8.4 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhändler..... 23

# 1. Vorbereitung.

## 1.1 Auslieferung

Bitte überprüfen Sie das Produkt bei Erhalt auf Vollständigkeit, Fehlerfreiheit und achten Sie auf eventuelle Transportschäden. Überprüfen Sie die Ware in Gegenwart ihres Überbringers. Sollten Transportschäden auftreten, veranlassen Sie bitte eine Bestandsaufnahme (Feststellung der Mängel) in Gegenwart des Überbringers. Senden Sie bitte eine schriftliche Reklamation an den zuständigen Fachhändler.

## 1.2 Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gebrauch

Die korrekte Benutzung des Produkts erfordert eine genaue und sorgfältige Einweisung des Anwenders bzw. der Begleitperson. Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Produktteile, die mit der Haut in Berührung kommen können, durch Sonneneinstrahlung aufheizen. Je nach Länge und Intensität der Sonneneinstrahlung können die Oberflächen einzelner Teile über 41°C steigen und damit bei direktem Hautkontakt zu leichten Verbrennungen führen. Decken Sie daher diese Stellen ab oder schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.

## 1.3 Sicheres Entsorgen

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umweltverschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling) zu verbessern, beachten Sie bitte die Entsorgungshinweise der **Punkte 1.3.1** und **1.3.2**.

### 1.3.1 Verpackung

Die Verpackung des Produkts sollte für einen eventuell später notwendigen Transport aufbewahrt werden. Falls Sie das Produkt zur Reparatur oder im Gewährleistungsfall zu uns zurückschicken müssen, verwenden Sie bitte nach Möglichkeit den Originalkarton, damit das Produkt optimal verpackt ist. Führen Sie ansonsten die Verpackungsmaterialien nach ihrer Art dem Recycling zu.



**Lassen Sie die Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt, da sie mögliche Gefahrenquellen sind.**

### 1.3.2 Produkt

Führen Sie nach Ablauf des Produktlebenszyklus die für das Produkt verwendeten Rohstoffe nach ihrer Art dem Recycling zu (siehe Materialinformation unter **Punkt 2.1**).



# 1. Vorbereitung.

## 1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese bei einem möglichen Wiedereinsatz beim Produkt verbleibt. Bei Verlust der Gebrauchsanleitung kann jederzeit eine aktuelle Version unter [www.schuchmann.de](http://www.schuchmann.de) heruntergeladen werden.

# 2. Produktbeschreibung.

## 2.1 Materialinformationen

Der Grundrahmen sowie die einzelnen Elemente sind aus Stahl und Aluminium gefertigt, korrosionsfrei und pulverbeschichtet. Die Bezüge bestehen zu 100% aus Polyester und sind schwer entflammbar (nach DIN EN 1021-1+2).

## 2.2 Handhabung / Transport

Der Therapiestuhl ist nicht zum Tragen vorgesehen, da er mit Rollen ausgestattet ist. Sollte sich das Tragen aufgrund von Hindernissen nicht vermeiden lassen, vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile festgezogen sind. Stellen Sie sich anschließend neben den Therapiestuhl, greifen Sie ihn vorne und hinten unter der Sitzeinheit und tragen Sie ihn an den gewünschten Platz. Um den Therapiestuhl zu transportieren, bringen Sie alle Einstellungen auf das kompakteste Maß (Fußbank hochklappen, Sitzhöhe auf niedrigste Einstellung etc.)

## 2.3 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemäße Verwendung

Der Therapiestuhl **madita-fun mini.** ist ein Medizinprodukt der Risikoklasse 1 und für die Erstversorgung im Kleinkindalter und für den Einsatz zu Hause konzipiert. Individuell einstellbare Sitzmaße und unterstützende Pelotten ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

### 2.3.1 Indikationen

Der Therapiestuhl **madita-fun mini.** ist für Kinder konzipiert, die nicht frei sitzen oder stehen können, aber deren eingeschränkte Rumpfhaltung ein Sitzen in einer Sitzschale nicht ständig erfordert. Dazu zählt eine Beeinträchtigung des Sitzens bei funktionellen und/oder strukturellen Schädigungen des Rumpfes bzw. der Rumpf- und gegebenenfalls Halsmuskulatur (z. B. durch neurologische/neuromuskuläre Erkrankungen, Deformierungen der Wirbelsäule) mit Fehlhaltungen.

## 2. Produktbeschreibung.

### 2.3.2 Kontraindikationen

Generell sollte die Indikation von ärztlich-orthopädischer Seite begleitet werden. Deshalb sollte vor einer Versorgung abgeklärt werden, ob Kontraindikationen bezüglich des Anwenders bestehen. Generell sind jede Art von Schmerzen eine Kontraindikation.



### 2.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung / Warnhinweise

- Achten Sie darauf, dass der Therapiestuhl nur von einem Anwender genutzt wird.
- Benutzen Sie den Therapiestuhl nur auf ebenen und festem Untergrund.
- Verwenden Sie den Therapiestuhl nicht zum Transport von Personen.
- Um ein sicheres Anheben beim Transport des Therapiestuhls zu gewährleisten, stehen Sie seitlich neben dem Therapiestuhl und fassen ihn vorne und hinten an der Sitzfläche an. Dabei sollten alle beweglichen Teile festgezogen sein.
- Lassen Sie den Anwender niemals unbeaufsichtigt im Therapiestuhl sitzen.
- Die korrekte Benutzung des Therapiestuhls erfordert eine genaue und sorgfältige Einweisung der Begleitperson.
- Die max. Belastung (siehe **Punkt 6**) darf nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie den Therapiestuhl nicht mit defekten, verschlissenen oder fehlenden Teilen.
- Aus Gründen des Brandschutzes darf der Therapiestuhl nicht in die Nähe eines offenen Feuers oder einer anderen starken Wärmequelle wie Elektro- oder Gasheizer gestellt werden.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile der Firma Schuchmann, da Sie anderenfalls die Sicherheit des Anwenders gefährden.
- Verwenden Sie den Therapiestuhl nur, wenn alle Bauteile korrekt angebracht und eingestellt sind.
- Es ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher Art keine Extremitäten von Anwender oder Nutzer im ein- / verstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Anwender mit einer Seh- oder Lesebehinderung müssen sich die Gebrauchsanleitung vorlesen lassen, um sicher mit dem Therapiestuhl umgehen zu können.

### 2.5 Ausstattung Grundmodell

- inkl. Armlehnen, Fußbank mit Polster, ergonomisch geformtem Schiebegriff, Standard-Sitzpolster mit Bezug, 4 Laufrollen (75 mm), davon 2 mit Feststeller
- Sitzhöhe einstellbar mit Gasdruckfederunterstützung (800 N)
- Rahmenfarbe: Telegrau 4 (Weißgrau)
- Verstellmöglichkeiten: Sitzwinkel (per Gasdruckfeder 250 N), Rückenwinkel, Sitztiefe und Sitzbreite, winkel-, höhen- und breitenverstellbare
- Armlehnen, höhenverstellbare Rückenlehne, kniewinkel- und höhenverstellbare Fußbank



## 2. Produktbeschreibung.

### 2.6 Auflistung Zubehör

- Standard-Rückeneinheit
- Rücken mit integrierter
- Oberarmführung
- Thoraxpelotten, lang (Rumpfführung)
- Thoraxpelotten
- Sitzpolster mit anatomischer Beinführung
- Dysplasie-Sitz
- Oberschenkelführung
- Innenbeinführung
- Inkontinenzbeschichtung im Sitzbereich
- Kopfstütze (gepolstert und höhenverstellbar)
- Kopfstütze (gepolstert, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar)
- Holztherapietisch
- Tischauflegepolster
- Begurtungs-Montagesatz für den Sitzbereich / Rückenbereich
- Brustschultergurt
- Lätzchen
- Sitzhose T-Form
- Beckengurt
- 4-Punkt-Beckengurt

### 2.7 Produktübersicht

Die untenstehende Abbildung soll Ihnen die Bezeichnung der wichtigsten Bauteile zeigen, sowie die Begriffe, die Sie beim Lesen dieser Gebrauchsanleitung wiederfinden.

#### Kopfstütze

#### Schiebebügel

#### Thoraxpelotten

#### Dysplasie-Sitz

#### Rücken

#### Armlehnen

#### Oberschenkelführung

#### Fußbankpolster

#### Laufrolle hinten mit Feststeller

#### Laufrolle vorne



## 3. Einstellungen.

Einstellungen und Verstellungen am Produkt oder dem Zubehör dürfen lediglich von Personen vorgenommen werden, die eine entsprechende Einweisung durch einen Medizinprodukteberater erhalten haben. Dabei ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher Art keine Extremitäten von Anwender oder Nutzer im ein- / verstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Alle Einstellungen können mit handelsüblichem Werkzeug (z.B. Inbus, Schraubendreher oder Schraubenschlüssel) durchgeführt werden.

### 3.1 Sitzhöhe

Die Sitzhöhe wird mittels einer Gasdruckfeder verstellt. Um die Sitzhöhe nach oben zu verstellen, wird das Fußpedal (A) am Grundgestell betätigt. Durch leichtes Drücken gleitet die Sitzeinheit nach oben. Das Absenken wird durch Druck von oben auf den Sitz bei gleichzeitiger Betätigung des Fußpedals erreicht. Die Gasdruckfeder dient lediglich zur Unterstützung der Höhenverstellung. Das Fußpedal kann mit dem Zugspannstift (B) (zu finden auf der Innenseite des Fußpedals) gegen ungewollte Bedienung gesichert werden.

Drehen Sie hierzu den Zugspannstift bis er einrastet. Unterstützen Sie eventuell durch leichtes Bewegen des Fußpedals das Einrasten. Die Arretierung wird aufgehoben, indem der Zugspannstift herausgezogen und um eine Viertelumdrehung verdreht wird.



**Achten Sie darauf, dass während des Einstellens / Verstellens der Sitzhöhe keine Körperteile (Füße) in den Bereich der Einstell- / Verstellmechanik (zwischen Boden und Fußstütze des Therapiestuhles) gelangen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.**

### 3.2 Sitzwinkel

Der Auslösegriff (C) für die Sitzwinkelverstellung ist am Schiebegriff montiert. Zur Sitzwinkelverstellung betätigen Sie einfach den Auslösegriff (C).



## 3. Einstellungen.

### 3.3 Sitztiefe

Zum Einstellen der Sitztiefe lösen Sie die zwei Flügelschrauben **(A)** unterhalb der Sitzeinheit. Danach lässt sich die Sitzfläche stufenlos nach vorne oder hinten verschieben.



**Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Schraubverbindungen wieder fest!**

### 3.4 Rückenneigung

Der Rücken lässt sich nach Lösen des Sterngriffes **(B)** auf der rechten Seite der Sitzeinheit im Winkel verstellen.



**Achten Sie darauf, dass während des Einstellens / Verstellens der Rückenneigung keine Körperteile in den Bereich der Einstell- / Verstellmechanik gelangen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.**

### 3.5 Rückenhöhe

Lösen Sie die Schrauben **(C)** an der Rückseite des Therapiestuhls und bringen Sie den Rücken in die gewünschte Höhe.



### 3.6 Rücken mit integrierter Oberarmführung


Der Rücken mit integrierter Oberarmführung ist serienmäßig mit Polster, Bezug und kleinen Polsterkeilen (ca. 3 cm) ausgestattet. Mit den Polsterkeilen kann im unteren Rumpfbereich eine Muldenform für eine bestmögliche Positionierung des Rumpfes erzielt werden. Um die Muldenform zu verändern, lösen Sie das Polster vom Rücken und öffnen den Reißverschluss an der Rückseite. Bringen Sie nun die Polsterkeile in die gewünschte Position, schließen den Reißverschluss und bringen das Polster wieder am Rücken an.




## 3. Einstellungen.

### 3.7 Armlehnen

Die Armlehnen sind im Winkel, in der Höhe und in der Breite verstellbar. Die Winkelverstellung erfolgt nach Lösen des Sterngriffes (A). Durch Lösen des Sterngriffes (B) lässt sich die Höhe einstellen.

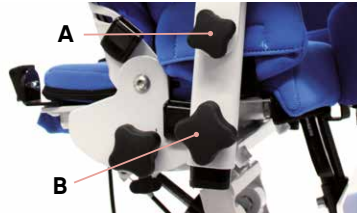

Die Breitenverstellung erfolgt nach Lösen der beiden Madenschrauben (C), die sich auf der Unterseite der Sitzeinheit befinden.

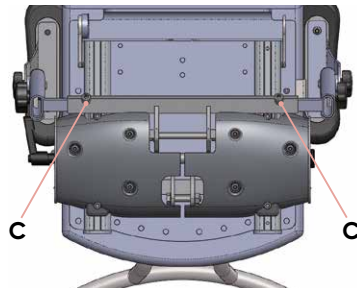


**Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Schraubverbindungen wieder fest!**

### 3.8 Fußbank

Die Fußbank ist höhen- und kniewinkelverstellbar. Lösen Sie die Schraube (D), um die Höhe einzustellen und bringen die Fußbank in die gewünschte Position. Um den Kniewinkel einzustellen, lösen Sie den Schnellspanner (E) unterhalb der Sitzeinheit. Bringen Sie den Kniewinkel der Fußbank nun in die gewünschte Position.



**Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Schraubverbindungen wieder fest!**

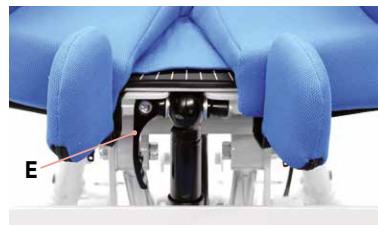

## 3. Einstellungen.

### 3.9 Laufrollen

Der Therapiestuhl sollte grundsätzlich durch Abbremsen der 2 hinteren Laufrollen festgestellt werden, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu vermeiden. Drücken Sie dazu mit der Fußspitze die Bremsen (A) herunter.





**Die Bremse dient nur zur Verhinderung von unbeabsichtigtem Wegrollen auf ebenen Flächen!**

## 4. Zubehör.

### 4.1 Kopfstütze

Die Kopfstütze ist in zwei Varianten erhältlich. Um die Höhe der ersten Variante zu verstellen, lösen Sie die beiden Zylinderskopfschrauben mit Innensechskant (B) und bringen die Kopfstütze in die gewünschte Position. Um die zweite Variante in Höhe, Tiefe und Winkel zu verstellen, lösen Sie die Schrauben (C) und bringen Sie die Kopfstütze in die gewünschte Position.

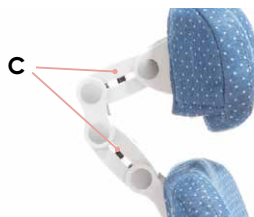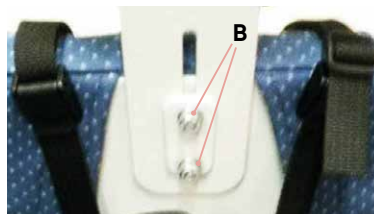

## 4. Zubehör.

### 4.2 Thoraxpelotten beim Standard-Rücken

Die Thoraxpelotten sind in normaler und langer Variante (mit Rumpfführung) erhältlich. Beide Varianten sind individuell in der Höhe und Breite einstellbar. Ziehen Sie den Polsterbezug auf der Rückseite des Rückens ab und lösen Sie die beiden Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant (A). Bringen Sie die Thoraxpelotte in die gewünschte Position und ziehen Sie die Schrauben wieder an. Befestigen Sie anschließend den Polsterbezug wieder auf der Rückseite des Rückens.



### 4.3 Thoraxpelotten beim Rücken mit ingetrierter Oberarmführung

Die Thoraxpelotten sind in normaler und langer Variante (mit Rumpfführung) erhältlich. Beide Varianten sind individuell in der Höhe und Breite einstellbar.




### Höheneinstellung

Öffnen Sie die Reißverschlüsse an der Vorderseite des Rückenpolsters und ziehen Sie den Polsterbezug auf der Rückseite des Rückens ab. Lösen Sie dann die beiden Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant (B) und bringen Sie die Thoraxpelotte in die gewünschte Höhe. Ziehen Sie die Schrauben wieder an und befestigen Sie den Polsterbezug auf der Rückseite des Rückens wieder und schließen die Reißverschlüsse.

### Breiteneinstellung

Ziehen Sie den Stoff auf der Vorderseite der Thoraxpelotte zur Seite. Lösen Sie die darunter liegenden Schrauben (C) und bringen Sie die Thoraxpelotten in die gewünschte Breite. Ziehen Sie die Schrauben wieder an und verdecken Sie die Schrauben wieder mit dem Bezugstoff.

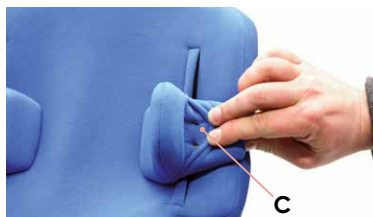

## 4. Zubehör.

### 4.4 Oberschenkelführung


Die Polster der Oberschenkelführung sind individuell in Breite, Tiefe und Winkel verstellbar.

Zum Einstellen der Breite, der Tiefe und des Winkels lösen Sie die Zylinderkopfschraube mit Innensechskant (**A**) unterhalb der Sitzfläche und bringen die Oberschenkelführung in die gewünschte Position.

Für eine zusätzliche Tiefeneinstellung öffnen Sie die Klettverschlüsse (**B**) und lösen die 2 Linsenkopfschrauben mit Innensechskant (**C**). Bringen Sie das Polster in die gewünschte Position und ziehen Sie die Schrauben wieder an. Schließen Sie die Klettverschlüsse wieder.




**Ziehen Sie nach jeder Einstellung die Schraubverbindungen wieder fest!**

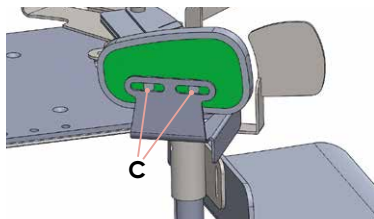

## 4. Zubehör.

### 4.5 Dysplasie-Sitz

Der Dysplasie-Sitz ermöglicht eine medizinisch notwendige Abduktion der Oberschenkel. Zum Einstellen der Beinführungen lösen Sie die Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant **(A)** auf der Unterseite des Sitzblechs. Hierdurch löst sich die Lamellenklemmung und die Innen- und Außenbeinführungen können im Winkel verschoben werden. Für eine gleiche Winkeleinstellung der Beine ist auf dem oberen Klemmblech eine Winkelskala **(B)** von 0° bis 30° pro Seite aufgebracht. Verschieben Sie die Beinführung in die gewünschte Position. Der Widerstand der Lamellenklemmung ermöglicht Ihnen eine visuelle Kontrolle der Einstellung, auch im gelösten Zustand. Ziehen Sie anschließend die Schrauben wieder an.

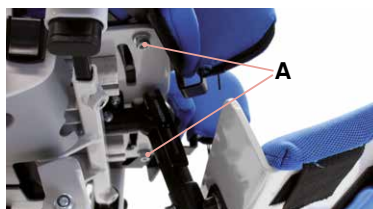

### 4.6 Innenbeinführung

Zum Einstellen der Beinführungen lösen Sie die Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant **(C)** auf der Unterseite des Sitzblechs. Hierdurch löst sich die Lamellenklemmung kann die Innenbeinführung im Winkel verschoben werden. Für eine gleiche Winkeleinstellung der Beine ist auf dem oberen Klemmblech eine Winkelskala von 0° bis 30° pro Seite aufgebracht. Verschieben Sie die Beinführung in die gewünschte Position. Der Widerstand der Lamellenklemmung ermöglicht Ihnen eine visuelle Kontrolle der Einstellung, auch im gelösten Zustand. Ziehen Sie anschließend die Schrauben wieder an.




**Ziehen Sie nach jeder Einstellung die Schraubverbindungen wieder fest!**

## 4. Zubehör.




### 4.7 Therapietisch

Der Therapietisch wird von vorne in die Tischhalterung (A) am Therapiestuhl gesteckt und ist in der Tiefe und Höhe einstellbar. Zur Befestigung des Therapietisches ziehen Sie die Flügelschraube (B) fest. Zur Einstellung der Tiefe lösen Sie wieder die Flügelschraube und bringen den Tisch in die gewünschte Position. Es ist dabei darauf zu achten, daß das Tiefenverstellrohr (C) bis zum Ende in die Tischhalterung des Armlehnenträgers eingeschoben ist. Die Höheneinstellung erfolgt über die Verstellung der Armlehnen (siehe **Punkt 3.7**).

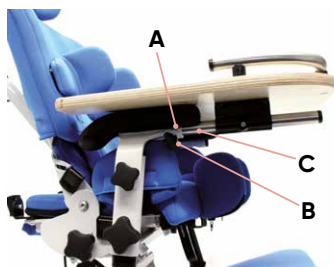

### 4.8 Begurtung

Für **madita-fun mini** steht eine Reihe von Begurtungen zur Verfügung, die für eine noch bessere Positionierung des Anwenders sorgen. Die Begurtung ist mit den Begurtungsmontagesätzen für den Sitz- oder den Rückenbereich zu montieren. Sie haben die Wahl zwischen Brustschultergurt (D), einer Sitzhose (Standard) bzw. einer Sitzhose in T-Form (E), einem Beckengurt (F) und einem 4-Punkt-Beckengurt (G). Unsere Positionierungshilfen sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie in unserem Bestellformular/ Anpassbogen unter **[www.schuchmann.de/madita-fun-mini](http://www.schuchmann.de/madita-fun-mini)**.

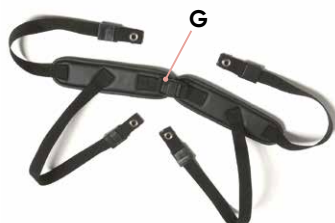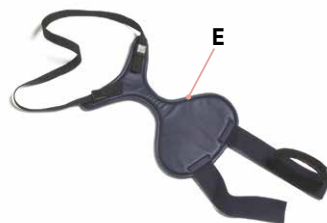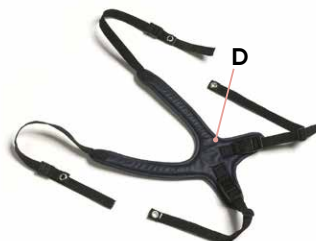

Der Brustschultergurt (D) dient ausschließlich zur Stabilisierung des Oberkörpers und zur Aufrichtung der Schultern.



**Der Brustschultergurt ersetzt keine Beckenfixierung!**

Das Becken muss stets separat gesichert werden – z. B. mit einem Beckengurt (F), einer Sitzhose (E) oder einer anderen ge-

## 4. Zubehör.

eigneten Beckenpositionierung. Ohne eine korrekte Beckenpositionierung besteht das Risiko, dass das Kind nach unten rutscht.



**Strangulationsgefahr! Ein falsch angelegter oder unzureichend gesicherter Brustschultergurt kann dazu führen, dass das Kind in eine gefährliche Position rutscht.**

Achten Sie darauf, dass alle Gurte korrekt sitzen und regelmäßig überprüft werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Kind sicher im Sitzsystem positioniert ist.
- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt im Gerät.



**Sollten Unsicherheiten zur richtigen Anwendung bestehen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder eine geschulte Fachkraft.**

## 5. Reinigen und Instandhalten.


### 5.1 Reinigen und Desinfizieren

#### 5.1.1 Reinigung

Alle Rahmenelemente bitte regelmäßig mit einem Schwamm oder feuchtem Tuch reinigen, insbesondere Wassertropfen sollten entfernt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen sollte die Reinigung mit einem milden Haushaltsreiniger erfolgen. Wichtig ist ein gründliches Trocknen der gereinigten Stellen.

Alle Stoffe, die nicht abgenommen werden können, können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei allen abnehmbaren Stoffen beachten Sie bitte die eingenähten Pflegeetiketten (wie z. B. **A+B**) an dem jeweiligen Element.

Beachten Sie bitte auch unsere allgemeinen Reinigungs- und Hygienehinweise. Diese finden Sie auf **[www.schuchmann.de/mediathek](http://www.schuchmann.de/mediathek)**.

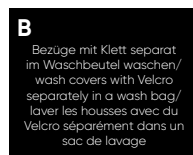

## 5. Reinigen und Instandhalten.

### 5.1.2 Desinfektion

Zur Flächendesinfektion der Metall- und Kunststoffteile können verschiedene Produkte eingesetzt werden.

Flüssige Desinfektionsmittel gibt es als fertige Lösung, die aufgesprüht und mit einem weichen Tuch gleichmäßig aufgetragen werden. Alternativ können auch mit Desinfektionsmittel vorgetränkte Tücher verwendet werden, mit denen die Produkte flächendeckend abgewischt werden. In beiden Fällen muss auf eine vollständige Benetzung geachtet werden. Eine Desinfektion in vollautomatischen Desinfektionsanlagen ist ebenfalls möglich und empfehlenswert.

Die Einwirkzeiten können variieren und sind den Herstellerangaben der verwendeten Mittel zu entnehmen.

### 5.2 Instandhaltung

Bitte führen Sie eine tägliche Sichtprüfung durch und kontrollieren regelmäßig das Produkt auf Risse, Brüche, fehlende Teile und Fehlfunktionen. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion direkt an den ausliefernden Fachhändler (siehe **Punkt 8.4**).

### 5.3 Wartung

Aus Gründen der Sicherheit des Anwenders und zur Erhaltung der Produkthaftung hat mindestens einmal jährlich eine Wartung durch den Fachhandel (siehe **Punkt 8.4**) zu erfolgen. Die durchgeführten Wartungen sind im Wartungsplan (siehe **Punkt 5.3.2**) zu dokumentieren.

#### 5.3.1 Wartungsvorgaben

- Grundlegende Reinigung nach Herstellervorgabe (siehe **Punkt 5.1.1**)
- Ggf. Desinfektion nach Herstellervorgabe (siehe **Punkt 5.1.2**)
- Beschädigungen an Rahmen, Anbauteilen und Zubehör (Risse, Brüche, Korrosion, verbogene oder fehlende Teile)
- Festigkeit der Verbindungen (lose Schrauben nachziehen, fehlende Schrauben ersetzen)
- Funktionsfähigkeit der Verstellelemente (Schrauben, Auslösehebel, Fußpedal)
- Funktionsfähigkeit weiterer Verstellelemente (Rücken, Kopfstütze, Pelotten, Armlehnen, Fußstützen, Tisch und Führungen im Beinbereich)
- Funktionsfähigkeit der Gasdruckfedern (ggf. Nachjustierung der Bowdenzüge)
- Funktionsfähigkeit der Sicherheitselemente (Kippsicherung)
- Korrekte Montage der Sitzeinheit
- Funktionsfähigkeit der Bremsen

# 5. Reinigen und Instandhalten.

- Funktionsfähigkeit der Laufrollen (Rundlauf, Leichtgängigkeit)
- Prüfung der Begurtung auf Beschädigungen (Klemmvorrichtungen, Verschlüsse, Nähte)
- Prüfung der Polster und Bezüge auf Beschädigungen
- Lesbarkeit des Typenschilds
- Abschließende vollständige Funktionskontrolle des Hilfsmittels
- Kontrolle der korrekten Befestigung aller Anbauteile und des zugehörigen Zubehörs

## 5.3.2 Wartungsplan

Wartungsvorgaben des Herstellers (siehe **Punkt 5.3.1**) wurden durchgeführt:

| Datum | Unternehmen | Name | Unterschrift |
|-------|-------------|------|--------------|
|       |             |      |              |
|       |             |      |              |
|       |             |      |              |
|       |             |      |              |
|       |             |      |              |
|       |             |      |              |
|       |             |      |              |



**Festgestellte Mängel oder Beschädigungen müssen vor der Wiederverwendung durch den Fachhandel oder den Hersteller behoben werden.**



## 5. Reinigen und Instandhalten.

### 5.4 Ersatzteile

Verwenden Sie nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile der Firma Schuchmann, da Sie anderenfalls die Sicherheit des Anwenders gefährden und die Gewährleistung erlischt.

Für eine Ersatzteilbestellung wenden Sie sich bitte unter Angabe der Seriennummer des Produkts an den ausliefernden Fachhändler (siehe **Punkt 8.4**). Notwendige Ersatzteile und Zubehör dürfen lediglich durch geschultes Personal montiert werden.

### 5.5 Nutzungsdauer und Wiedereinsatz

Die zu erwartende Nutzungsdauer unseres Produktes, in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität und Anzahl der Wiedereinsätze, beträgt bis zu „8“ Jahren, wenn die Nutzung in Übereinstimmung mit den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung erfolgt. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem sicheren Zustand befindet. Die zu erwartende Nutzungsdauer bezieht sich nicht auf Verschleißteile wie z.B. Laufräder, Gasdruckfedern,... . Die Wartung und Beurteilung des Zustandes und gegebenenfalls der Wiedereinsetzbarkeit obliegt dem Fachhandel.


Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Bitte führen Sie vor Weitergabe die unter **Punkt 5.1** genannten Reinigungs- und Desinfektionshinweise aus. Begleitpapiere wie z. B. diese Gebrauchsanleitung sind Bestandteil des Produkts und müssen an den neuen Nutzer übergeben werden. Für den Wiedereinsatz ist keine vorherige Demontage vorgesehen. Im Falle einer Lagerung ist es empfehlenswert, das Produkt zur Platzersparnis auf das kompakteste Maß einzustellen.



**Sollte es während der Nutzungsdauer bei der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts zu einem schwerwiegendem Vorkommnis kommen, ist dies unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.**

## 6. Technische Daten.

### Maße

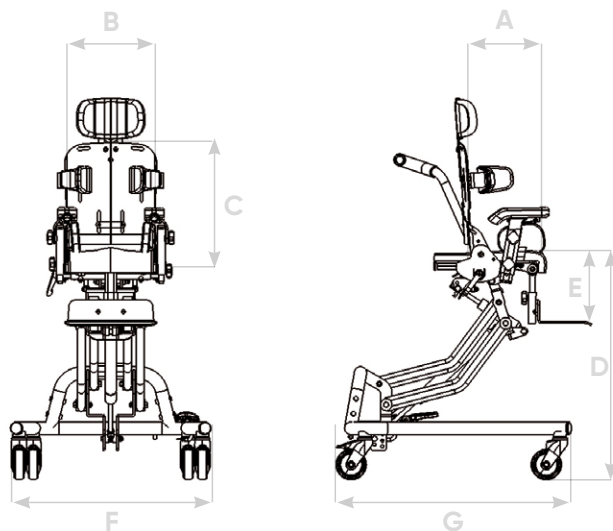

|          |                              | Maße                   |
|----------|------------------------------|------------------------|
| <b>A</b> | Sitztiefe                    | 12 – 19 cm             |
| <b>B</b> | Sitzbreite                   | 14 – 22 cm             |
| <b>C</b> | Rückenhöhe mit kurzem Rücken | 28 – 33 cm             |
| <b>C</b> | Rückenhöhe mit langem Rücken | 30 – 35 cm             |
| <b>D</b> | Sitzhöhe                     | 25 – 62 cm             |
| <b>E</b> | Unterschenkellänge           | 12 – 22 cm             |
| <b>F</b> | Breite gesamt                | 52 cm                  |
| <b>G</b> | Länge Grundrahmen            | 58 cm                  |
|          | Sitzwinkel                   | (-)5° – 37° / 0° – 42° |
|          | Rückenwinkel                 | (-)5° – 25°            |
|          | max. Belastung               | 20 kg                  |
|          | Gewicht                      | 16 kg                  |



## 7. Gewährleistung.

Bei allen Produkten gilt die zweijährige gesetzliche Gewährleistungsfrist. Diese beginnt mit der Ablieferung bzw. der Übergabe der Ware. Tritt innerhalb dieser Zeitspanne an der von uns gelieferten Ware nachweislich ein Werkstoff- oder Fabrikationsfehler auf, werden wir bei frachtfreier Rücksendung an uns, den angezeigten Schaden sichten und gegebenenfalls kostenlos und nach unserer Wahl nachbessern oder neu liefern.

## 8. Identifizierung.

### 8.1 Seriennummer / Herstellungsdatum

Die Seriennummer, das Herstellungsdatum sowie weitere Angaben finden Sie auf dem Typenschild, das sich auf jedem unserer Produkte befindet (A).

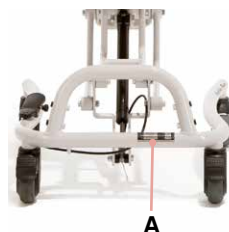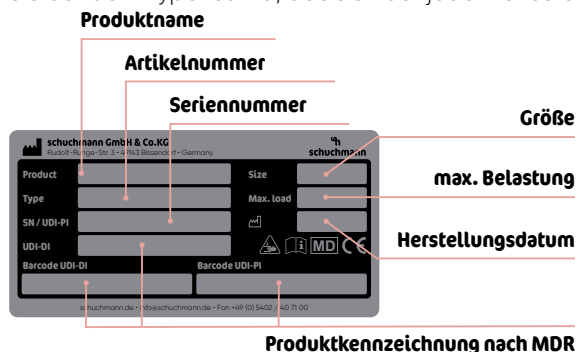

### 8.2 Produktversion

Der Therapiestuhl **madita-fun mini.** ist in drei Größen erhältlich und kann durch vielfältiges Zubehör ergänzt werden (siehe **Punkt 2.6**).

### 8.3 Ausgabe des Dokuments

Gebrauchsanleitung **madita-fun mini.** – Änderungsstand H; Ausgabe 05.2025

### 8.4 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhändler

Dieses Produkt wurde hergestellt von:



#### Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf

Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Dieses Produkt wurde von folgendem Fachhändler ausgeliefert:





**schuchmann.de**