

fridolin maxi.



Gebrauchsanleitung.

fridolin maxi. Das funktionelle Untergestell für den Innenbereich.

Vielen Dank.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an dieser Stelle möchten wir Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den Erwerb unseres Produkts danken. Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Berücksichtigen Sie bitte, dass Hinweise und Darstellungen in dieser Gebrauchsanleitung auf Grund der Ausstattung von Ihrem Produkt abweichen können. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Wichtige Information!

Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanleitung bei dem Produkt verbleibt.

Ihr **schuchmann**-Team



1. Vorbereitung.	04
1.1 Auslieferung.....	04
1.2 Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gebrauch.....	04
1.3 Sicheres Entsorgen.....	04
1.3.1 Verpackung.....	04
1.3.2 Produkt.....	04
1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung.....	05
2. Produktbeschreibung.	05
2.1 Materialinformationen.....	05
2.2 Handhabung / Transport.....	05
2.3 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemäße Verwendung.....	05
2.3.1 Indikation.....	05
2.3.2 Kontraindikation.....	05
2.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung / Warnhinweise.....	06
2.5 Ausstattung Grundmodell.....	06
2.6 Auflistung Zubehör.....	06
2.7 Produktübersicht.....	07
3. Einstellungen.	08
3.1 Sitzhöhe.....	08
3.2 Sitzwinkel.....	08
3.3 Doppellaufrollen.....	08
4. Zubehör.	09
4.1 Schiebegriff Maxi.....	09
4.2 Fußbank.....	09
4.3 Aufsteckbares Fußbrett.....	09
4.4 Radstandsverlängerung.....	10
4.5 Adaption von Sitzschalen.....	10
5. Reinigen und Instandhalten.	11
5.1 Reinigen und Desinfizieren.....	11
5.1.1 Reinigung.....	11
5.1.2 Desinfektion.....	11
5.2 Instandhaltung.....	12
5.3 Wartung.....	12
5.3.1 Wartungsvorgaben.....	12
5.3.2 Wartungsplan.....	13
5.4 Ersatzteile.....	13
5.5 Nutzungsdauer und Wiedereinsatz.....	13
6. Technische Daten.	14
7. Gewährleistung.	14
8. Identifizierung.	15
8.1 EU Konformitätserklärung.....	15
8.2 Seriennummer / Herstellungsdatum.....	16
8.3 Produktversion.....	16
8.4 Ausgabe des Dokuments.....	16
8.5 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhändler.....	16



1. Vorbereitung.

1.1 Auslieferung

Bitte überprüfen Sie das Produkt bei Erhalt auf Vollständigkeit, Fehlerfreiheit und achten Sie auf eventuelle Transportschäden. Überprüfen Sie die Ware in Gegenwart ihres Überbringers. Sollten Transportschäden auftreten, veranlassen Sie bitte eine Bestandsaufnahme (Feststellung der Mängel) in Gegenwart des Überbringers. Senden Sie bitte eine schriftliche Reklamation an den zuständigen Fachhändler.

1.2 Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gebrauch

Die korrekte Benutzung des Produkts erfordert eine genaue und sorgfältige Einweisung des Anwenders bzw. der Begleitperson. Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Produktteile, die mit der Haut in Berührung kommen können, durch Sonneneinstrahlung aufheizen. Je nach Länge und Intensität der Sonneneinstrahlung können die Oberflächen einzelner Teile über 41°C steigen und damit bei direktem Hautkontakt zu leichten Verbrennungen führen. Decken Sie daher diese Stellen ab oder schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.

1.3 Sicheres Entsorgen

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umweltverschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling) zu verbessern, beachten Sie bitte die Entsorgungshinweise der **Punkte 1.3.1** und **1.3.2**.

1.3.1 Verpackung

Die Verpackung des Produkts sollte für einen eventuell später notwendigen Transport aufbewahrt werden. Falls Sie das Produkt zur Reparatur oder im Gewährleistungsfall zu uns zurückschicken müssen, verwenden Sie bitte nach Möglichkeit den Originalkarton, damit das Produkt optimal verpackt ist. Führen Sie ansonsten die Verpackungsmaterialien nach ihrer Art dem Recycling zu.



Lassen Sie die Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt, da sie mögliche Gefahrenquellen sind.

1.3.2 Produkt

Führen Sie nach Ablauf des Produktlebenszyklus die für das Produkt verwendeten Rohstoffe nach ihrer Art dem Recycling zu (siehe Materialinformation unter **Punkt 2.1**).

1. Vorbereitung.

1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese bei einem möglichen Wiedereinsatz beim Produkt verbleibt. Bei Verlust der Gebrauchsanleitung kann jederzeit eine aktuelle Version unter www.schuchmann.de heruntergeladen werden.

2. Produktbeschreibung.

2.1 Materialinformationen

Das Untergestell ist aus Stahl gefertigt, korrosionsfrei und pulverbeschichtet.

2.2 Handhabung / Transport

Das Untergestell ist nicht zum Tragen vorgesehen, da es mit Rollen ausgestattet ist. Sollte sich das Tragen aufgrund von Hindernissen nicht vermeiden lassen, vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile festgezogen sind. Stellen Sie sich anschließend neben das Untergestell, greifen Sie es an beiden Seiten unter dem Aufnahmekopf, tragen Sie es an den gewünschten Platz. Um das Untergestell zu transportieren, bringen Sie alle Einstellungen auf das kompakteste Maß (Fußbank hochklappen, Sitzhöhe auf niedrigste Einstellung etc.).



Ziehen Sie alle beweglichen Teile vor dem Tragen fest!

2.3 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemäße Verwendung

Das Indoor-Untergestell **fridolin maxi** ist ein Medizinprodukte der Risiko-kategorie 1 und eignet sich ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich. Das Untergestell ist konzipiert als Unterbau zur Aufnahme von Sitzsystemen bzw. Sitzschalen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

2.3.1 Indikation

Die Indikation für das Untergestell **fridolin maxi** leitet sich aus denen der Sitzsysteme und Sitzschalen ab.

2.3.2 Kontraindikation

Generell sollte die Indikation der Versorgung mit einem Sitzschalen-Untergestell in Verbindung mit einem Sitzsystem oder einer Sitzschale von ärztlich-orthopädischer Seite begleitet werden. Deshalb sollte vor einer Versorgung diesbezüglich abgeklärt werden, ob Kontraindikationen bezüglich des Patienten bestehen. Generell sind jede Art von Schmerzen eine Kontraindikation.



2. Produktbeschreibung.

2.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung / Warnhinweise

- Achten Sie darauf, dass das Untergestell in Kombination mit einer Sitzschale nur von einem Anwender genutzt wird.
- Lassen Sie den Anwender niemals unbeaufsichtigt.
- Nutzen Sie das Untergestell in Kombination mit einer Sitzschale nicht zum Transport von Personen.
- Die korrekte Benutzung des Untergestells erfordert eine genaue und sorgfältige Einarbeitung der Begleitperson.
- Die max. Belastung (siehe **Punkt 6**) darf nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie das Untergestell nicht mit defekten, verschlissenen oder fehlenden Teilen.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile der Firma Schuchmann, da Sie anderenfalls die Sicherheit des Anwenders gefährden.
- Verwenden Sie das Untergestell nur, wenn alle Bauteile korrekt angebracht und eingestellt sind.
- Es ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher Art keine Extremitäten von Anwender oder Nutzer im ein- / verstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Anwender, mit einer Seh-, Lese- oder geistigen Behinderung, müssen sich die Gebrauchsanleitung vorlesen lassen, um den Umgang mit dem Gehtrainer zu verstehen.

2.5 Ausstattung Grundmodell

- Sitzhöhe einstellbar mittels Kurbel, Schrägverstellung der Sitzeinheit durch zwei Gasdruckfedern à 200N bedienbar per Fußpedal
- inkl. 4 Doppellaufrollen (100 mm), davon 2 mit Feststeller
- inkl. Aufnahmekopf und Fußbankeinsteckung
- Rahmenfarbe: Anthrazit metallic

2.6 Auflistung Zubehör

- Schiebegriff Maxi
- Radstandsverlängerung
- Aufnahmekopf Maxi
- Trapezadapter Unterteil Gr. 1
- Trapezadapter Oberteil Gr. 1
- Aluminium-Fußbank
- Aufsteckbare Fußbank

2. Produktbeschreibung.

2.7 Produktübersicht

Die untenstehende Abbildung soll Ihnen die Bezeichnung der wichtigsten Bauteile zeigen, sowie die Begriffe, die Sie beim Lesen dieser Gebrauchsanleitung wiederfinden.

Schiebegriff

Gasdruckfedern für Schrägverstellung der Sitzeinheit

Fußpedal für Schrägverstellung der Sitzeinheit

Doppellaufrolle mit Feststeller



Kurbel für Sitzhöhenverstellung

Aufnahmekopf

Mittelsäule


Doppellaufrolle

3. Einstellungen.

Einstellungen und Verstellungen am Produkt oder dem Zubehör dürfen lediglich von Personen vorgenommen werden, die eine entsprechende Einweisung durch einen Medizinprodukteberater erhalten haben. Dabei ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher Art keine Extremitäten von Anwender oder Nutzer im ein- / verstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Alle Einstellungen können mit handelsüblichem Werkzeug (z.B. Inbus, Schraubendreher oder Schraubenschlüssel) durchgeführt werden.

3.1 Sitzhöhe

Das Untergestell lässt sich bis zu 12 cm in der Höhe einstellen, die Anlieferung erfolgt in der niedrigsten Einstellung. Die Verstellung erfolgt durch Betätigen der Kurbel (A) unterhalb des Grundgestelles. Zusätzlich müssen die beiden Gasdruckfedern der Sitzwinkelverstellung in der Höhe nachgestellt werden. Dies erfolgt nach Demontage der Verschraubungen am unteren Ende der beiden Gasdruckfedern und Versetzen in dem Lochbild der Laschen (B) am Grundgestell. Diese Einstellung sollte von Ihrem Fachhändler übernommen werden.

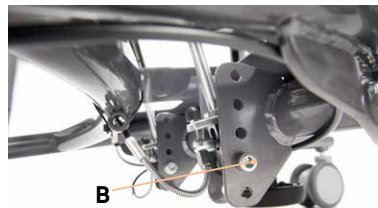

3.2 Sitzwinkel

Der Sitzwinkel kann mit Hilfe von 2 Gasdruckfedern (à 200N) von (-)5° bis 30° verstellt werden. Betätigen Sie hierfür das Fußpedal (C) und bringen die Sitzeinheit in den gewünschten Winkel.



3.3 Doppellaufrollen

Das Untergestell sollte grundsätzlich durch Abbremsen der 2 hinteren Doppellaufrollen festgestellt werden, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu vermeiden. Drücken Sie dazu mit der Fußspitze die Bremse (D) herunter.




Die Bremse dient nur dem unbeabsichtigten Wegrollen auf ebenen Flächen.

4. Zubehör.


4.1 Schiebegriff Maxi

Der Schiebegriff Maxi ist in der Höhe und im Winkel einstellbar. Zur Höheneinstellung lösen Sie beide Klemmhebel (A), bringen den Schiebegriff Maxi in die gewünschte Position und ziehen die Klemmhebel wieder fest. Zur Winkeleinstellung lösen Sie bitte die beiden Klemmhebel (B), bringen den Schiebegriff Maxi in den gewünschten Winkel und ziehen die Klemmhebel wieder fest.

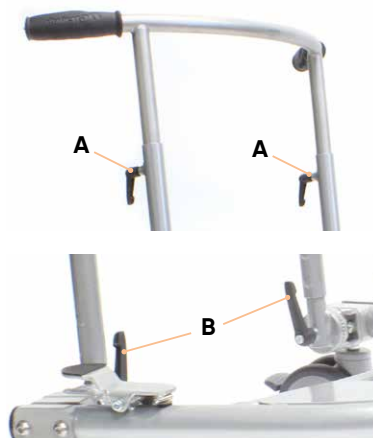

4.2 Fußbank


Für **fridolin maxi** gibt es verschiedene Fußbankvarianten die am Aufnahmekopf befestigt werden. Nachdem die jeweilige Fußbank in den Aufnahmekopf (C) gesteckt und die Tiefe eingestellt wurde, kann der Kniewinkel mit Hilfe der beiden Klemmhebel (D) festgestellt werden. Die Unterschenkelänge kann individuell angepasst werden und die Fußbänke sind je nach Variante hochklappbar und winkelverstellbar.

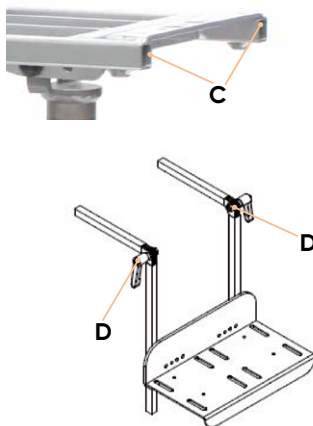

Ziehen Sie nach jeder Einstellung die Schraubverbindungen wieder fest!

4.3 Aufsteckbares Fußbrett

Das leicht aufsteckbare Fußbrett ermöglicht den einfachen Transfer innerhalb der Räumlichkeiten. Stecken Sie beim montieren des Fußbrettes zuerst die hintere Aufnahme (E) in das Grundgestell und klappen dieses dann nach unten. Achten Sie dabei darauf, dass die Zugschnapper (F) richtig einrasten. Zum Abnehmen des Fußbrettes ziehen Sie die beiden Zugschnapper (F) heraus und heben das Fußbrett an.

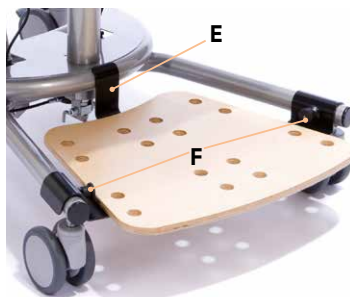

4. Zubehör.

4.4 Radstandsverlängerung

Die Radstandsverlängerung dient dazu, die Stabilität auch für größere Sitzsysteme bei nach hinten geneigten Sitzwinkel zu gewährleisten.




Die Radstandsverlängerung ist nicht einstellbar!

4.5 Adaption von Sitzschalen

fridolin maxi. sit vorbereitet für die Aufnahme einer Sitzeinheit / Sitzschale. Die Verbindung stellt der Sitzadapter dar.

Sitzschalenadapter Trapezform:

Die Sitzschale mit dem trapezförmig montierten Adapterstück auf das trapezförmige Sitzschalenaufnahmeblech setzen und nach hinten schieben. Dabei rastet der Patentverschluss selbstständig ein. Nun den Rändelknopf **(A)** des Patentverschlusses festdrehen. Beim Abnehmen der Sitzschale zuerst den Rändelknopf **(A)** losdrehen und durch nach unten ziehen wird die Verbindung zwischen Adapter und Sitzschalenaufnahme freigegeben. Die Schale kann jetzt nach vorne weggezogen werden.

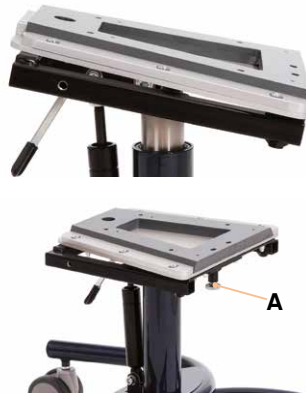

Achten Sie darauf, dass der Patentverschluss richtig eingerastet ist und der Rändelknopf fest angezogen ist, so dass Sie den Rändelknopf nicht mehr ziehen können!


5.1 Reinigen und Desinfizieren

5.1.1 Reinigung

Alle Rahmenelemente bitte regelmäßig mit einem Schwamm oder feuchtem Tuch reinigen, insbesondere Wassertropfen sollten entfernt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen sollte die Reinigung mit einem milden Haushaltsreiniger erfolgen. Wichtig ist ein gründliches Trocknen der gereinigten Stellen.

Alle Stoffe, die nicht abgenommen werden können, können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei allen abnehmbaren Stoffen beachten Sie bitte die eingenähten Pflegeetiketten (wie z. B. **A+B**) an dem jeweiligen Element.

Beachten Sie bitte auch unsere allgemeinen Reinigungs- und Hygienehinweise. Diese finden Sie auf **www.schuchmann.de/mediathek**.

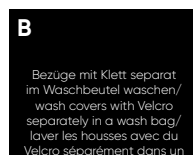

5.1.2 Desinfektion

Zur Flächendesinfektion der Metall- und Kunststoffteile können verschiedene Produkte eingesetzt werden.

Flüssige Desinfektionsmittel gibt es als fertige Lösung, die aufgesprüht und mit einem weichen Tuch gleichmäßig aufgetragen werden. Alternativ können auch mit Desinfektionsmittel vorgetränkte Tücher verwendet werden, mit denen die Produkte flächendeckend abgewischt werden. In beiden Fällen muss auf eine vollständige Benetzung geachtet werden. Eine Desinfektion in vollautomatischen Desinfektionsanlagen ist ebenfalls möglich und empfehlenswert. Die Einwirkzeiten können variieren und sind den Herstellerangaben der verwendeten Mittel zu entnehmen.



5. Reinigen und Instandhalten.

5.2 Instandhaltung

Bitte führen Sie eine tägliche Sichtprüfung durch und kontrollieren regelmäßig das Produkt auf Risse, Brüche, fehlende Teile und Fehlfunktionen. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion direkt an den ausliefernden Fachhändler (siehe **Punkt 8.5**).

5.3 Wartung

Aus Gründen der Sicherheit des Anwenders und zur Erhaltung der Produkthaftung hat mindestens einmal jährlich eine Wartung durch den Fachhändler (siehe **Punkt 8.5**) zu erfolgen. Die durchgeführten Wartungen sind im Wartungsplan (siehe **Punkt 5.3.2**) zu dokumentieren.

5.3.1 Wartungsvorgaben

- Grundlegende Reinigung nach Herstellervorgabe
- Ggf. Desinfektion nach Herstellervorgabe
- Beschädigungen an Rahmen, Anbauteilen und Zubehör (Risse, Brüche, Korrosion, verbogene oder fehlende Teile)
- Festigkeit der Verbindungen (lose Schrauben nachziehen, fehlende Schrauben ersetzen)
- Funktionsfähigkeit der Verstellelemente (Schrauben, Auslösehebel, Rastelemente, Fußpedal)
- Funktionsfähigkeit weiterer Verstellelemente (Schiebebügel und Fußstützen)
- Funktionsfähigkeit der Gasdruckfedern (ggf. Nachjustierung der Bowdenzüge)
- Funktionsfähigkeit der Sicherheitselemente (Kippsicherung)
- Funktionsfähigkeit der Bremsen
- Funktionsfähigkeit der Laufrollen (Rundlauf, Leichtgängigkeit)
- Lesbarkeit des Typenschilds
- Abschließende vollständige Funktionskontrolle des Hilfsmittels
- Kontrolle der korrekten Befestigung aller Anbauteile und des zugehörigen Zubehörs

5. Reinigen und Instandhalten.

5.3.2 Wartungsplan

Wartungsvorgaben des Herstellers (siehe **Punkt 4.3.1**) wurden durchgeführt:

Datum	Unternehmen	Name	Unterschrift



Festgestellte Mängel oder Beschädigungen müssen vor der Wiederverwendung durch den Fachhandel oder den Hersteller behoben werden.

5.4 Ersatzteile

Verwenden Sie nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile des Herstellers, da Sie anderenfalls die Sicherheit des Anwenders gefährden und die Gewährleistung erlischt.

Für eine Ersatzteilbestellung wenden Sie sich bitte unter Angabe der Seriennummer des Produkts an den ausliefernden Fachhändler (siehe **Punkt 8.5**). Notwendige Ersatzteile und Zubehör dürfen lediglich durch geschultes Personal montiert werden.


5.5 Nutzungsdauer und Wiedereinsatz

Die zu erwartende Nutzungsdauer unseres Produktes, in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität und Anzahl der Wiedereinsätze, beträgt bis zu „8“ Jahren, wenn die Nutzung in Übereinstimmung mit den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung erfolgt. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem sicheren Zustand befindet. Die zu erwartende Nutzungsdauer bezieht sich nicht auf Verschleißteile wie z. B. Bezüge, Räder, Batterien,..... Die Wartung und Beurteilung des Zustandes und gegebenenfalls der Wiedereinsetzbarkeit obliegt dem Fachhandel. Das Sitzschalen-Untergestell ist für den Wiedereinsatz geeignet. Bitte führen Sie vor Weitergabe die unter **Punkt 5.1** genannten Reinigungshinweise aus. Begleitpapiere wie z. B. diese Gebrauchsanleitung sind Bestandteil des Produkts und müssen an den neuen Nutzer übergeben werden. Für den Wiedereinsatz ist keine vorherige Demontage vorgesehen.



6. Technische Daten.

Maße

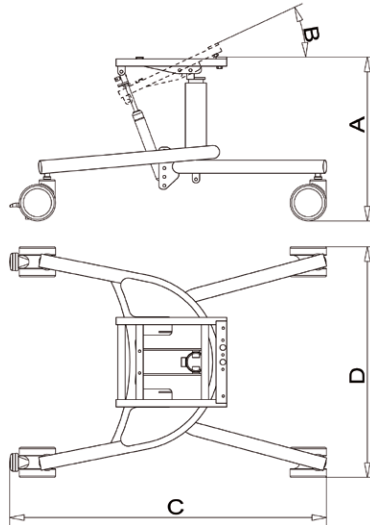

A	Höhe Sitzschalenaufnahme	44 - 56 cm
B	Sitzwinkel	(-) 5° - 30°
C	Länge Gesamt	80 cm
D	Breite Gesamt	66 cm
	Stärke der Gasdruckfeder zur Schrägverstellung	2 x 200 N
	max. Belastung	100 kg
	Gewicht	11,5 kg

7. Gewährleistung.

Bei allen Produkten gilt die zweijährige gesetzliche Gewährleistungsfrist. Diese beginnt mit der Ablieferung bzw. der Übergabe der Ware. Tritt innerhalb dieser Zeitspanne an der von uns gelieferten Ware nachweislich ein Werkstoff- oder Fabrikationsfehler auf, werden wir bei frachtfreier Rücksendung an uns, den angezeigten Schaden sichten und gegebenenfalls kostenlos und nach unserer Wahl nachbessern oder neu liefern.

8. Identifizierung.

8.1 EU Konformitätserklärung



EU Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity



Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
Actor ID / SRN: DE-MF-000013435

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

„fridolin maxi.“ Fahrgestell für den Innenbereich / *chassis for indoor use*

Art.-Nr. / Item-No.: 22 03 000, 22 02 000, 26 01 000, 26 02 000

Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004000220XXXXN

den einschlägigen Bestimmungen der im folgenden aufgeführten Richtlinien und Standards entspricht:
is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte vom 05. April 2017
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen
Assistive products for persons with disability

DIN EN ISO 14971:2022 Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
Medical devices – Application of risk management to medical devices

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und
ist gültig bis zum 31.12.2027.

*This declaration of conformity applies only for products with above-named item-numbers
and is valid until 31.12.2027.*

Datum / Date: 15.05.2023

Unterschrift / Sign:

Name / Name: Torster Schuchmann


Funktion / Function: Verantwortliche Person / *Person responsible for regulatory compliance*



8. Identifizierung.

8.2 Seriennummer / Herstellungsdatum

Die Seriennummer, das Herstellungsdatum sowie weitere Angaben finden Sie auf dem Typenschild, das sich auf jedem unserer Produkte befindet (A).

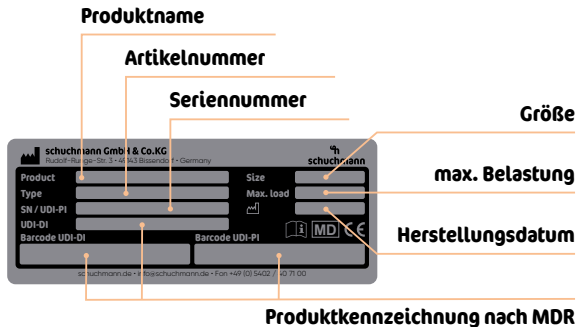

8.3 Produktversion

Das Sitzschalen-Untergestell **fridolin maxi** ist in einer Größe erhältlich und kann durch vielfältiges Zubehör ergänzt werden (siehe **Punkt 4**).

8.4 Ausgabe des Dokuments

Gebrauchsanleitung **fridolin maxi**. – Änderungsstand G; Ausgabe 05.2023

8.5 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhändler

Dieses Produkt wurde hergestellt von:



Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Dieses Produkt wurde von folgendem Fachhändler ausgeliefert: