



Schau mal, der Fleck ist weg.



„Jetzt wischen wir das Tischlein rein und **tim.** wird bald schon sauber sein.“ Nicht nur **tim.**, all unsere Hilfsmittel lassen sich superleicht von Schmutz befreien. Auf den folgenden Seiten erklären wir, wie sie gereinigt und genutzt werden sollen. Aber noch viel spannender: Such dir aus unserer großen Auswahl an Stoffen und Farben dein Lieblingsmuster aus!

Einführung in die Nutzung unserer Produkte.

Bitte beachten Sie, dass **Menschen mit geistiger, Lese- oder Sehbehinderung** sich unsere technische Dokumentation von Eltern, Betreuungsperson oder technischem Berater vorlesen bzw. erklären lassen müssen, um eine sichere Anwendung unserer Produkte gewährleisten zu können.

Wir weisen darauf hin, dass ausschließlich **Ersatzteile und Zubehör** aus unserem Hause verwendet und verbaut werden dürfen, um die Sicherheit des Nutzers nicht zu gefährden. Im Einzelfall bedürfen Kombinationen mit Produkten anderer Hersteller der Abklärung durch den Fachhandel oder mit uns, als Hersteller.

Einstellungen und Verstellungen am Produkt oder dem Zubehör dürfen lediglich von Personen vorgenommen werden, die eine entsprechende Einweisung durch einen Medizinprodukteberater erhalten haben. Dabei ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher Art keine Extremitäten von Anwender oder Nutzer im einstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Für den Transport ist das jeweilige Produkt auf die kompaktesten Maße zu verstellen. Stellen Sie beispielsweise Sitz, Armlehnen, Rücken etc. auf die niedrigsten Maße. Entfernen Sie Teile des Produktes, die einfach zu demontieren sind, wie z. B. die Räder beim Stehtrainer **todd.**, den Lenker beim **momo dreirad.** etc. Klappen Sie bei Produkten mit Fußbank diese hoch.

Detaillierte Angaben hierzu entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung des einzelnen Produkts.

Gebrauchsanleitungen zu den jeweiligen Produkten stehen unter www.schuchmann.de/mediathek zur Verfügung.

Gegebenenfalls sind **produktspezifische Reinigungshinweise** aus den jeweiligen Gebrauchsanleitungen zu berücksichtigen.

Reinigungsmaßnahmen nach Materialart.

Die Pflege und Reinigung von unseren Produkten sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, um eine Funktionsfähigkeit über die Nutzungsdauer zu gewährleisten. Dabei ist die Wahl der geeigneten Reinigungsmittel entscheidend.

Holz: Holzteile sind nebelfeucht mit einem Tuch o.Ä. zu reinigen. Bitte beachten Sie bei den Reinigungsmitteln die Herstellerangaben zur Konzentration des Putzmittels. Scharfe Haushaltsreiniger oder scheuernde Substanzen sind ungeeignet. Das Naturprodukt Holz nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da es Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern kann (Quellung). Deshalb stets nur feucht (d.h. mit ausgewringenen Tüchern) wischen und pflegen. Test auf Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle vornehmen.

Pulverbeschichtete Teile: Aluminiumteile sind unter Verwendung von einem Schwamm oder feuchtem Tuch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln zu reinigen.

Edelstahl: Edelstahlteile sind unter Verwendung von einem Schwamm oder feuchtem Tuch mit milder Seifenlauge zu reinigen. Es dürfen keine Bleichmittel verwendet werden.

Bezüge / Stoffteile: Bezüge bzw. Stoffteile sind unter Verwendung von handelsüblichem Waschmittel bei 40 °C in der Waschmaschine zu reinigen und dürfen nicht im Trockner getrocknet werden.

Kunststoffe: Kunststoffe sind unter Verwendung von einem Schwamm oder feuchtem Tuch mit milder Seifenlauge zu reinigen. Es dürfen keine Bleichmittel verwendet werden.

PU (Polyurethane): PU-Teile sind unter Verwendung von einem Schwamm oder feuchtem Tuch mit milder Seifenlauge zu reinigen. Es dürfen keine Bleichmittel verwendet werden.

Bei Fragen wende
dich gerne direkt
an uns!



