

wave.



 **rifton.**

Gebrauchsanleitung.

wave. Die Bade- und Duschliege von Rifton.


schuchmann®

Vielen Dank.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an dieser Stelle möchten wir Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den Erwerb unseres Produkts danken. Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Berücksichtigen Sie bitte, dass Hinweise und Darstellungen in dieser Gebrauchsanleitung auf Grund der Ausstattung von Ihrem Produkt abweichen können. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Wichtige Information!

Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanleitung bei dem Produkt verbleibt.

Ihr **schuchmann**-Team



1. Vorbereitung.	05
1.1 Auslieferung.....	05
1.2 Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gebrauch.....	05
1.3 Sicheres Entsorgen.....	05
1.3.1 Verpackung.....	05
1.3.2 Produkt.....	05
1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung.....	06
2. Produktbeschreibung.	06
2.1 Materialinformationen.....	06
2.2 Handhabung / Transport.....	06
2.3 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemäße Verwendung.....	06
2.3.1 Indikation.....	06
2.3.2 Kontraindikation.....	07
2.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung / Warnhinweise.....	07
2.5 Ausstattung Grundmodell.....	08
2.6 Auflistung Zubehör.....	08
2.7 Produktübersicht.....	08
3. Einstellungen.	09
3.1 Rückenlehne.....	09
3.2 Sitzwinkel.....	09
3.3 Wadenwinkel.....	09
3.4 Kopfstütze / Rumpfstütze.....	10
3.5 Brust-, Becken- und Beingurt.....	10
3.6 Standbeine.....	10
4. Zubehör.	11
4.1 Montage Badeliege auf dem Badewannen-Untergestell.....	11
4.1.1 Verstellung der Standbeine.....	11
4.2 Montage Badeliege auf dem Duschuntergestell.....	11
4.3 Montage Badeliege auf dem Transferuntergestell.....	12
4.3.1 Transfers mit dem Transferuntergestell.....	12
4.3.2 Schwenkbarkeit des Transferuntergestells von rechts nach links (oder umgekehrt).....	13
4.4 Bedienung der Lenkräder.....	13
5. Reinigen und Instandhalten.	14
5.1 Reinigen und Desinfizieren.....	14
5.1.1 Reinigung.....	14
5.1.2 Desinfektion.....	14
5.2 Instandhaltung.....	14
5.3 Wartung.....	14
5.4 Ersatzteile.....	15
5.5 Nutzungsdauer und Wiedereinsatz.....	15



6. Technische Daten.	16
7. Gewährleistung.	17
8. Identifizierung.	18
8.1 Seriennummer / Herstellungsdatum	18
8.2 Produktversion	19
8.3 Ausgabe des Dokuments.....	19
8.4 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhändler.....	19

1. Vorbereitung.

1.1 Auslieferung

Bitte überprüfen Sie das Produkt bei Erhalt auf Vollständigkeit, Fehlerfreiheit und achten Sie auf eventuelle Transportschäden. Überprüfen Sie die Ware in Gegenwart ihres Überbringers. Sollten Transportschäden auftreten, veranlassen Sie bitte eine Bestandsaufnahme (Feststellung der Mängel) in Gegenwart des Überbringers. Senden Sie bitte eine schriftliche Reklamation an den zuständigen Fachhändler.

1.2 Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gebrauch

Die korrekte Benutzung des Produkts erfordert eine genaue und sorgfältige Einweisung des Anwenders bzw. der Begleitperson. Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Produktteile, die mit der Haut in Berührung kommen können, durch Sonneneinstrahlung aufheizen. Je nach Länge und Intensität der Sonneneinstrahlung können die Oberflächen einzelner Teile über 41°C steigen und damit bei direktem Hautkontakt zu leichten Verbrennungen führen. Decken Sie daher diese Stellen ab oder schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.

1.3 Sicheres Entsorgen

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umweltverschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling) zu verbessern, beachten Sie bitte die Entsorgungshinweise der **Punkte 1.3.1** und **1.3.2**.

1.3.1 Verpackung

Die Verpackung des Produkts sollte für einen eventuell später notwendigen Transport aufbewahrt werden. Falls Sie das Produkt zur Reparatur oder im Gewährleistungsfall zu uns zurückschicken müssen, verwenden Sie bitte nach Möglichkeit den Originalkarton, damit das Produkt optimal verpackt ist. Führen Sie ansonsten die Verpackungsmaterialien nach ihrer Art dem Recycling zu.



Lassen Sie die Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt, da sie mögliche Gefahrenquellen sind.

1.3.2 Produkt

Führen Sie nach Ablauf des Produktlebenszyklus die für das Produkt verwendeten Rohstoffe nach ihrer Art dem Recycling zu (siehe Materialinformation unter **Punkt 2.1**).



1. Vorbereitung.

1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese bei einem möglichen Wiedereinsatz beim Produkt verbleibt. Bei Verlust der Gebrauchsanleitung kann jederzeit eine aktuelle Version unter www.schuchmann.de heruntergeladen werden.

2. Produktbeschreibung.

2.1 Materialinformationen

Die Bade- und Duschliege **wave**. ist aus UV-beständigem PVC-Rohr und Nylongewebe gefertigt. Alle Metallteile sind aus rostfreiem Stahl. Die Gurte sind aus Nylonklett genäht. Das Badeliegenuntergestell besteht aus UV-beständigem PVC Rohr. Alle Metallteile sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. Alle Artikel sind latexfrei.

2.2 Handhabung / Transport

Die Badeliege ist nicht zum Tragen vorgesehen. Sollte sich das Tragen aufgrund von Hindernissen nicht vermeiden lassen, vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile festgezogen sind. Um ein sicheres Anheben zu gewährleisten, müssen Sie die Badeliege seitlich rechts und links an den Kunststoffverkleidungen mit beiden Händen anfassen. Um die Badeliege zu transportieren, bringen Sie alle Einstellungen auf das kompakteste Maß (Rückenlehne einklappen, Sitzwinkel auf niedrigste Einstellung etc.).

2.3 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemäße Verwendung

Die Bade- und Duschliege **wave**. ist ein Medizinprodukt der Risikoklasse 1 und eignet sich ausschließlich für den Einsatz in Badewannen, Duschen, im Sandkasten und am Strand. Sie unterstützt Anwender, die nicht frei sitzen können und bietet zusätzlichen Halt durch Haltegurte. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

2.3.1 Indikation

Die Bade- und Duschliege **wave**. eignet sich für:

- Anwender, denen es unmöglich ist aufgrund von Funktionsstörung der unteren Extremität mit erheblich eingeschränkter oder vollständig aufgehobener Beweglichkeit der Gelenke in der Badewanne zu sitzen oder zu liegen
- Anwender mit Einschränkung der muskulären Kraft der unteren Extremität

2. Produktbeschreibung.

- Anwender mit einer Schädigung des Nervensystems, Schädigung neuromuskuloskeletaler Funktionen
- Anwendern mit Schädigung der bewegungsbezogenen Funktion und/oder Muskelfunktion und/oder bei Schädigung der neurologischen Funktion
- Anwender mit Bewegungsmuster mit erheblich eingeschränkter oder aufgehobener Rumpfkontrolle bzw. eingeschränkter oder aufgehobener Körperkontrolle

2.3.2 Kontraindikation

Generell sollte die Indikation von ärztlich-orthopädischer Seite begleitet werden. Deshalb sollte vor einer Versorgung diesbezüglich abgeklärt werden, ob Kontraindikationen bezüglich des Patienten bestehen. Generell ist jede Art von Schmerzen eine Kontraindikation.



2.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung / Warnhinweise

- Achten Sie darauf, dass die Bade- und Duschliege nur von einem Anwender genutzt wird.
- Lassen Sie den Anwender niemals unbeaufsichtigt auf der Bade- und Duschliege sitzen.
- Die korrekte Benutzung der Bade- und Duschliege erfordert eine genaue und sorgfältige Einarbeitung des behandelnden Betreuers.
- Die max. Belastung von 34 kg bei Gr. 1, 68 kg bei Gr. 2 und 114 kg bei Gr. 3 darf nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie die Bade- und Duschliege nicht mit defekten, verschlissenen oder fehlenden Teilen.
- Aus Gründen des Brandschutzes darf die Bade- und Duschliege nicht in die Nähe eines offenen Feuers oder einer anderen starken Wärmequelle wie Elektro- oder Gasheizgeräten gestellt werden.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile der Firma Schuchmann, da Sie anderenfalls die Sicherheit des Anwenders gefährden.
- Verwenden Sie die Bade- und Duschliege nur, wenn alle Bauteile korrekt angebracht und eingestellt sind.
- Die Bade- und Duschliege ist nicht zum Transport von Personen geeignet.
- Es ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher Art keine Extremitäten von Anwender oder Nutzer im ein- / verstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Anwender mit einer Seh- oder Lesebehinderung müssen sich die Gebrauchsanleitung vorlesen lassen, um sicher mit der Badeliege umgehen zu können.



2. Produktbeschreibung.

2.5 Ausstattung Grundmodell

- UV-beständiges Kunststoffgestell mit abnehmbarem Bezug
- winkelverstellbare Sitz- und Rückenfläche
- Rückenwinkel mit praktischer Einhandbedienung verstellbar
- zwei Liegehöhen über verstellbare Füße
- Grundmodell 1: Standard
- Grundmodell 2: Standard, mit im Winkel verstellbarer Wadenanlage
- Grundmodell 3: Standard, inkl. Kopfstütze, Beckengurt und Beingurt
- Grundmodell 4: Standard, mit im Winkel verstellbarer Wadenanlage, inkl. Kopfstütze, Beckengurt und Beingurt

2.6 Auflistung Zubehör

- Badewannenuntergestell
- Duschuntergestell
- Transferuntergestell
- Kopfstütze / Rumpfstütze
- Brustgurt / Beckengurt
- Brustgurt mit einstellbarer Seitenführung
- Beingurte


2.7 Produktübersicht

Die untenstehende Abbildung soll Ihnen die Bezeichnung der wichtigsten Bauteile zeigen, sowie die Begriffe, die Sie beim Lesen dieser Gebrauchsanleitung wiederfinden.



3. Einstellungen.

Die Bade- und Duschliege **wave.** bietet Unterstützung während des Badens in Badewannen oder anderen Badeumgebungen. Der Sitz, der Rücken und die Wadenanlage sind verstellbar. Rifton Wave ist in drei Größen lieferbar. Alle Größen der Badeliege passen auf das Duschuntergestell (**A**), das Badewannenuntergestell (**B**) und das Transferuntergestell (**C**).

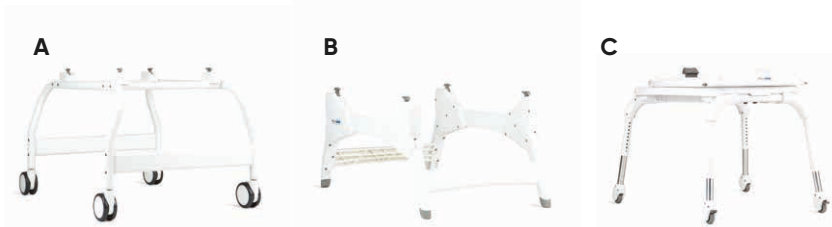

Einstellungen und Verstellungen am Produkt oder dem Zubehör dürfen lediglich von Personen vorgenommen werden, die eine entsprechende Einweisung durch einen Medizinprodukteberater erhalten haben. Dabei ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher Art keine Extremitäten von Anwender oder Nutzer im ein- / verstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

3.1 Rückenlehne

Für die Einstellung des Rückenwinkels muss der Griff (**D**) nach oben gezogen werden. Nun kann der Rücken in die gewünschte Position gestellt werden.



3.2 Sitzwinkel

Für die Einstellung des Sitzwinkels müssen die beiden grauen Auslöser (**E**) gleichzeitig nach vorne gezogen werden und der Sitz kann in die gewünschte Position gestellt werden. Der Sitz muss hörbar einrasten.



3.3 Wadenwinkel

Für die Einstellung des Winkels der Wadenanlage müssen die beiden grauen Auslöser (**F**) reingedrückt werden. Nun kann die Wadenanlage in die gewünschte Position gestellt werden. Die Wadenanlage muss hörbar einrasten.



3. Einstellungen.

3.4 Kopfstütze / Rumpfstütze

Die Position der Kopfstütze / Rumpfstütze (**A**) kann mittels Klettverschluss schnell und einfach in die gewünschte Position stufenlos eingestellt werden. Die Breite kann durch Verschieben der jeweiligen Führung verstellt werden.



3.5 Brust-, Becken- und Beingurt

Die Position des Brust-/Beckengurtes (**B**) kann mittels Klettverschluss schnell und einfach in die gewünschte Position stufenlos eingestellt werden. Die Position der Beingurte (**C**) wird ebenfalls, wie oben beschrieben, verstellt.



3.6 Standbeine


Um die Standbeine zu verstellen, ziehen Sie die Querverbinder (**D**) nach vorne bzw. unten, bringen Sie die Standbeine in die gewünschte Position und drücken Sie diese nach hinten bzw. oben zur Verriegelung.



4. Zubehör.

4.1 Montage Badeliege auf dem Badewannen-Untergestell

Stellen Sie die Füße der Badeliege in die maximal aufgerichtete Position (siehe **Punkt 3.6**). Danach die Füße der Badeliege fest in die Aufnahmen (**A**) des Untergestells drücken bis sie einrasten. Um die Badeliege herauszunehmen, die grauen Hebel (**B**), wie abgebildet, nacheinander herunterdrücken und die Badeliege anheben.

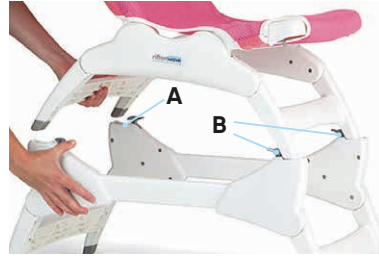

4.1.1 Verstellung der Standbeine

Die Standbeine des Badewannenuntergestells werden ebenso verstellt wie die Standbeine der Badeliege (siehe **Punkt 3.6**).



Vor dem Gebrauch sicherstellen, dass alle vier Beine der Badeliege fest in der Aufnahme am Untergestell gesichert sind!

4.2 Montage Badeliege auf dem Duschuntergestell

Die Füße der Badeliege fest in die Öffnung (**C**) des Untergestells drücken bis sie einschnappen. Um die Badeliege herauszunehmen, die grauen Hebel (**D**) nacheinander herunterdrücken und die Badeliege anheben.




Vor dem Gebrauch sicherstellen, dass alle vier Beine der Badeliege fest in der Aufnahme am Untergestell gesichert sind!



4. Zubehör.

4.3 Montage Badeliege auf dem Transferuntergestell

Drücken Sie die grauen Laschen (A) zusammen und stellen Sie die Beine aufrecht bis diese hörbar einrasten. Bringen Sie anschließend die Standbeine der Badeliege in eine komplett flache Position (siehe **Punkt 3.6**) und haken Sie die Badeliege unter dem Haken (B) ein. Drücken Sie die Badeliege nach unten bis sie hörbar unter dem grauen Haken (C) einrastet. Das Transferuntergestell kann in der Höhe verstellt werden. Dazu einfach den Knopf (D) in das Lochbild des Standbeines hereindrücken und an gewünschter Position aus dem Lochbild herauschnappen lassen. Diese Einstellung an allen vier Standbeinen wiederholen.

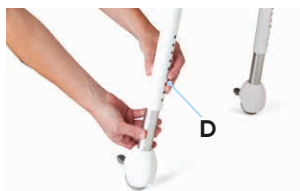

Die Höhenverstellung darf nur im unbenutzten Zustand erfolgen!

4.3.1 Transfers mit dem Transferuntergestell




Drücken Sie die den grauen Knopf (E) und drehen Sie die Badeliege zu sich. Ziehen Sie das Transferuntergestell vor bis an den inneren Rand der Badewanne und verriegeln Sie die Bremsen der Laufräder (F) (siehe **Punkt 4.4**). Positionieren Sie den Nutzer auf der Badeliege. Lösen Sie die Bremsen der Laufräder (F) und drehen Sie die Badeliege mit den Nutzer, während Sie seine Beine anheben in die Badewanne, indem Sie den grauen Knopf (E) drücken. Schieben Sie das Transferuntergestell mit den Nutzer in die Badewanne hinein. Stellen Sie die Bremsen der Laufräder (F) erneut fest.



4. Zubehör.

4.3.2 Schwenkbarkeit des Transferuntergestells von rechts nach links (oder umgekehrt)

Das Transferuntergestell ist entweder nach links oder nach rechts schwenkbar. Um die Richtung der Schwenkbarkeit jeweils zu ändern, entfernen Sie die Schrauben (A). Entfernen Sie die beiden Kunststoffgleiter (B) und den Kunststoffstecker (C) und heben Sie die obere Plattform an. Von hinten ist die obere Plattform leichter zu entfernen. Entnehmen Sie den Kunststoffanschlag (D) aus der Nut. Möglicherweise benötigen Sie dazu einen Schraubenzieher oder ein anderes Werkzeug. Setzen Sie den Kunststoffanschlag (D) am anderen Ende der gleichen Nut ein. Schieben Sie den Schieber (E) bis zum Anschlag hinein. Setzen Sie die vorher entnommene, obere Plattform wieder ein. Der Schieber (E) sollte nun aus der entgegengesetzten Aussparung herauschauen. Setzen Sie die beiden Schrauben (A) mit dem ausgelieferten Werkzeug wieder ein und ziehen Sie diese fest. Drücken Sie die Kunststoffgleiter (B) in die Löcher. Nun können Sie das Transferuntergestell in die gewünschte Richtung schwenken.

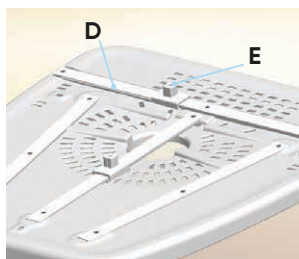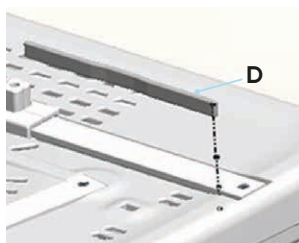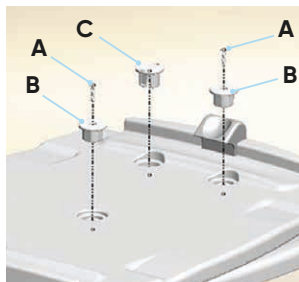

Je nachdem, ob Sie die Schwenkbarkeit von rechts nach links oder von links nach rechts ändern möchten, muss die Einstellung umgekehrt vorgenommen werden.

4.4 Bedienung der Lenkräder

Bremsen / Feststellen der Lenkräder (mit Schuhspitze):



Lösen der Lenkräder:



5. Reinigen und Instandhalten.

5.1 Reinigen und Desinfizieren

5.1.1 Reinigung

Alle Rahmenelemente bitte regelmäßig mit einem Schwamm oder feuchtem Tuch reinigen, insbesondere Wassertropfen sollten entfernt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen sollte die Reinigung mit einem milden Haushaltsreiniger erfolgen. Wichtig ist ein gründliches Trocknen der gereinigten Stellen.

Alle Stoffe, die nicht abgenommen werden können, können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei allen abnehmbaren Stoffen beachten Sie bitte die eingenähten Pflegeetiketten (wie z. B. **A+B**) an dem jeweiligen Element.

Beachten Sie bitte auch unsere allgemeinen Reinigungs- und Hygienehinweise. Diese finden Sie auf www.schuchmann.de/mediathek.



5.1.2 Desinfektion

Zur Flächendesinfektion der Metall- und Kunststoffteile können verschiedene Produkte eingesetzt werden.

Flüssige Desinfektionsmittel gibt es als fertige Lösung, die aufgesprüht und mit einem weichen Tuch gleichmäßig aufgetragen werden. Alternativ können auch mit Desinfektionsmittel vorgetränkte Tücher verwendet werden, mit denen die Produkte flächendeckend abgewischt werden. In beiden Fällen muss auf eine vollständige Benetzung geachtet werden. Eine Desinfektion in vollautomatischen Desinfektionsanlagen ist ebenfalls möglich und empfehlenswert.

Die Einwirkzeiten können variieren und sind den Herstellerangaben der verwendeten Mittel zu entnehmen.

5.2 Instandhaltung

Bitte führen Sie eine tägliche Sichtprüfung durch und kontrollieren regelmäßig das Produkt auf Risse, Brüche, fehlende Teile und Fehlfunktionen. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion direkt an den ausliefernden Fachhändler (siehe **Punkt 8.4**).

5.3 Wartung

Das Produkt ist wartungsfrei.

5. Reinigen und Instandhalten.

5.4 Ersatzteile

Verwenden Sie nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile der Firma Schuchmann, da Sie anderenfalls die Sicherheit des Anwenders gefährden und die Gewährleistung erlischt.

Für eine Ersatzteilbestellung wenden Sie sich bitte unter Angabe der Seriennummer des Produkts an den ausliefernden Fachhändler (siehe **Punkt 8.4**). Notwendige Ersatzteile und Zubehör dürfen lediglich durch geschultes Personal montiert werden.

5.5 Nutzungsdauer und Wiedereinsatz

Die zu erwartende Nutzungsdauer unseres Produktes, in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität und Anzahl der Wiedereinsätze, beträgt bis zu „8“ Jahren, wenn die Nutzung in Übereinstimmung mit den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung erfolgt. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem sicheren Zustand befindet. Die zu erwartende Nutzungsdauer bezieht sich nicht auf Verschleißteile wie z.B. Laufräder, Gasdruckfedern,... . Die Wartung und Beurteilung des Zustandes und gegebenenfalls der Wiedereinsetzbarkeit obliegt dem Fachhandel.


Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Bitte führen Sie vor Weitergabe die unter **Punkt 5.1** genannten Reinigungs- und Desinfektionshinweise aus. Begleitpapiere wie z. B. diese Gebrauchsanleitung sind Bestandteil des Produkts und müssen an den neuen Nutzer übergeben werden. Für den Wiedereinsatz ist keine vorherige Demontage vorgesehen. Im Falle einer Lagerung ist es empfehlenswert, das Produkt zur Platzersparnis auf das kompakteste Maß einzustellen.



Sollte es während der Nutzungsdauer bei der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts zu einem schwerwiegendem Vorkommnis kommen, ist dies unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

6. Technische Daten.

Maße

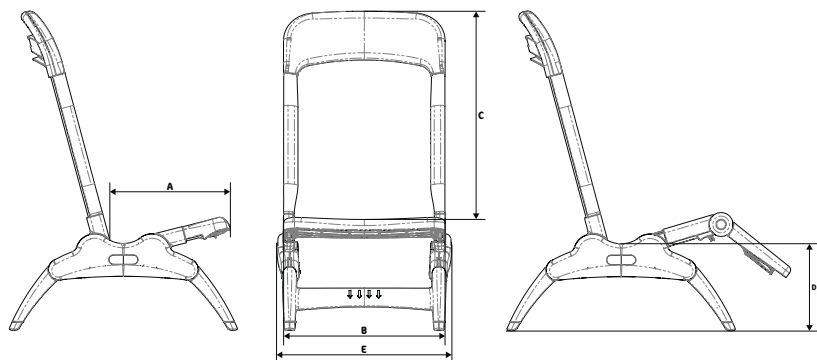

		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
A	Sitztiefe	27 cm	33 cm	43 cm
B	Sitzbreite	38 cm	38 cm	44 cm
C	Rückenhöhe	58 cm	67 cm	81 cm
D	Sitzhöhe	mit Kunststoffgestell	5 cm / 18 cm	5 cm / 18 cm
		mit Badewannenuntergestell	32 - 47 cm	32 - 47 cm
		mit Duschuntergestell	70 cm	70 cm
		mit Transferuntergestell	53 - 75 cm	53 - 75 cm
E	Breite	46 cm	46 cm	53 cm
	Länge Badeliege, komplett flach, ohne Wadenauflage	89 cm	104 cm	128 cm
	Länge Badeliege, komplett flach, mit Wadenauflage	108 cm	124 cm	155 cm
	Länge Kunststoffgestell, komplett flach	75 cm	75 cm	75 cm
	Höhe Badewannenuntergestell	20 cm	20 cm	20 cm
	Länge Badewannenuntergestell	99 cm	99 cm	99 cm
	Breite Badewannenuntergestell	44 cm	44 cm	44 cm
	Höhe Duschuntergestell	56 cm	56 cm	56 cm
	Breite Duschuntergestell	69 cm	69 cm	69 cm
	Länge Duschuntergestell	86 cm	86 cm	86 cm
	Körpergröße	76 - 117 cm	102 - 142 cm	124 - 188 cm
	max. Belastung	34 kg	68 kg	114 kg
	Rücken- und Sitzwinkel	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°

7. Gewährleistung.





Bei allen Produkten gilt die zweijährige gesetzliche Gewährleistungsfrist. Diese beginnt mit der Ablieferung bzw. der Übergabe der Ware. Tritt innerhalb dieser Zeitspanne an der von uns gelieferten Ware nachweislich ein Werkstoff- oder Fabrikationsfehler auf, werden wir bei frachtfreier Rücksendung an uns, den angezeigten Schaden sichten und gegebenenfalls kostenlos und nach unserer Wahl nachbessern oder neu liefern.



8. Identifizierung.

8.1 Seriennummer / Herstellungsdatum

Die Seriennummer, das Herstellungsdatum sowie weitere Angaben finden Sie auf dem Typenschild, das sich auf jedem unserer Produkte befindet (A).

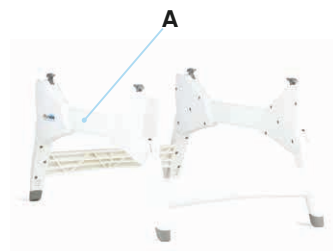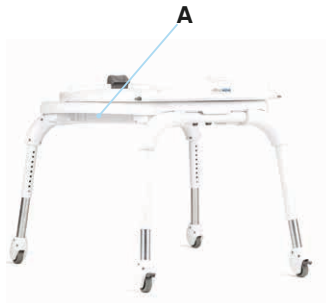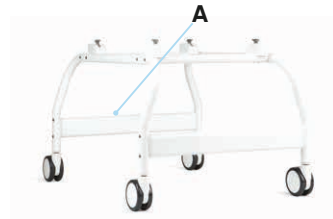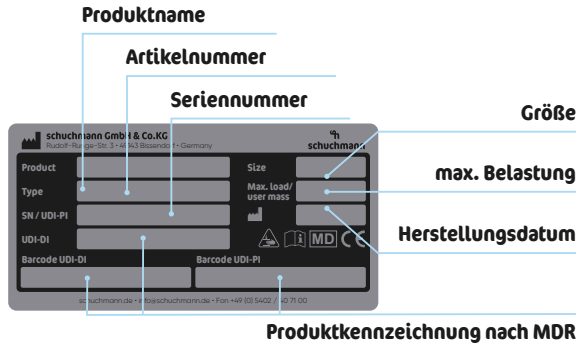

8. Identifizierung.

8.2 Produktversion

Die Bade- und Duschliege **wave.** ist in drei Größen erhältlich und kann durch vielfältiges Zubehör ergänzt werden (siehe **Punkt 4**).

8.3 Ausgabe des Dokuments

Gebrauchsanleitung **wave.** – Änderungsstand J; Ausgabe 12.2025

8.4 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhändler

Dieses Produkt wurde hergestellt von:



Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf

Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Dieses Produkt wurde von folgendem Fachhändler ausgeliefert:



schuchmann.de